

# LA PRÉVENTION, NOTRE AMBITION, VOTRE MISSION

## MEDISUR VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE

*Un test de dépistage salivaire est un outil de prévention qui peut être utilisé par les entreprises permettant de répondre à leur obligation de mise en œuvre de moyens renforcés. (CE n°394178 du 5.12.2016)*

*Pour l'étude du règlement intérieur, les sensibilisations des collaborateurs, les formations des managers, la mise en place de campagnes de dépistages, Medisur vous accompagne à chaque étape de votre projet de prévention.*



100 impasse des Houillères  
13590, Meyreuil

04 42 96 09 68  
contact@medisur.fr

[www.prevention-addiction.fr](http://www.prevention-addiction.fr)

Centre de formation n° 93 131 788 813



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECCTE  
Direction Régionale de l'Entreprise  
de la Consommation, de la Concurrence,  
du Travail et de l'Emploi



# ONETEST



## NOTICE D'UTILISATION

# PROCÉDURE

# 1

Ne pas manger, fumer ou boire 10 minutes avant de faire le test.



# 2

Déballer le dispositif du sachet et enlever le capuchon.




# 3

Mettre l'embout papier du dispositif **sous la langue**. Le maintenir ainsi, légèrement **incliné vers le haut** (environ 15°).



# 4

Constamment **presser la langue contre le dessus de l'embout papier pendant 1 minute**. Ne pas mordre, mâcher ou retirer l'embout papier.

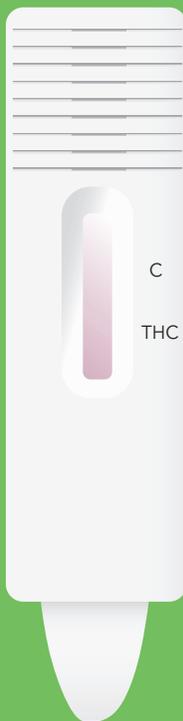

# 5

Laisser sous la langue le temps qu'une couleur rosée apparaisse et atteigne les premiers chiffres.

# 6

Refermer le capuchon et poser à plat pendant **6 à 7 minutes** puis interpréter les résultats.

# INTERPRÉTATION

Les résultats sont interprétables si la bande de contrôle 'C' apparaît.



## POSITIF

Le test est **positif** au cannabis lorsqu'il n'apparaît **pas de bande colorée** au niveau du repère THC.



## NÉGATIF

Le test est **négatif** au cannabis lorsqu'il apparaît **une bande colorée** au niveau du repère THC.

*Ne pas interpréter au-delà de 15 minutes.  
Un résultat positif doit être confirmé par une méthode plus spécifique.*